

SEPTOGARD AP PLUS

PMC n.20351

Detergente disinfettante ad ampio spettro di efficacia contro virus e spore.

Concentrato da diluire.



**PRESIDIO MEDICO
CHIRURGICO**

Registrazione n° 20351
del Ministero della Salute



Caratteristiche

- Detergente disinfettante privo di aldeidi
- Ampio spettro su batteri, lieviti, funghi, virus capsulati / non capsulati e su spore di C. difficile
- Pulisce e disinfetta in presenza di sporco, sangue e proteine
- Conforme con DVG e VAH (Germania)
- Registration pending in diversi paesi europei.

Informazioni tecniche per l'utente

Septogard AP PLUS è un detergente disinfettante ad alte prestazioni privo di aldeidi con eccezionali prestazioni microbicide e attività ad ampio spettro contro batteri, lieviti, funghi, virus e spore. La sua efficacia contro le spore di C. difficile e diversi tipi di virus corrisponde perfettamente all'uso di questa formulazione in ospedali, strutture di assistenza a lungo termine e istituzioni. Può essere utilizzato anche in ristoranti, impianti di produzione alimentare e scuole.

INGREDIENTI

Principio attivo

Didecildimetilammonio cloruro (DDAC, CAS No 7173-51-5) circa 6,9%

Altri ingredienti

Acqua, agente chelante, tensioattivi, coformulanti circa 93,1%

Informazioni sull'utilizzo

Rimuovere i depositi grossolani di sporco dalla superficie. Quindi inumidire accuratamente la superficie con la diluizione appropriata del concentrato per litro d'acqua a seconda dell'applicazione. La soluzione d'uso può essere applicata con una varietà di metodi, tra cui la salvietta, la scopa o l'ammollo. Risciacquare o lasciare asciugare all'aria. Il risciacquo dei pavimenti non è necessario a meno che non debbano essere cerati o lucidati. Preparare una soluzione fresca ogni giorno o più spesso se la soluzione diventa visibilmente sporca o diluita.

Dati di efficacia

Per supportare un prodotto attraverso il regolamento sui biocidi (BPR, EU (No) 528/2012), i dati dei test EN pertinenti devono essere presentati come parte del fascicolo. La norma EN 14885 (disinfettanti chimici e antisettici - applicazione della norma europea sui disinfettanti chimici e antisettici) specifica i metodi di laboratorio necessari per sostenere i diversi claims per il disinfettante chimico. Le norme europee di prova (EN) e i relativi criteri di efficacia associati sono delineati per le diverse aree di applicazione per esempio. Aree "mediche", "veterinarie", "alimentari", "industriali e istituzionali" e "domestiche".

Ogni test EN specifica una gamma limitata di specie microbiche da utilizzare. Questi sono stati scelti come organismi rappresentativi a sostegno di affermazioni più ampie sul prodotto (ad esempio battericida, levuricida, fungicida, sporicida, virucida e micobattericida), tenendo conto della loro rilevanza pratica per ciascuna delle aree di applicazione. Inoltre, vengono specificati diversi terreni (o sostanze interferenti) a seconda dell'applicazione finale. Questo supporta l'efficacia richiesta dal prodotto e la sua idoneità per l'area specifica di utilizzo. Tutti i dati presentati per Septogard AP PLUS sono conformi alla norma EN 14885 per supportare il claim per le aree "medica", "alimentare", "veterinaria" e "industriale e istituzionale".

SEPTOGARD AP PLUS MODALITÀ D'USO E DOSAGGI



Attività	Diluizione (ml di Concentrato/ lt. di acqua)		Tempo di Contatto (min)
Battericida	40	2 Dosi	15
Fungicida	40	2 Dosi	15
Virucida	40	2 Dosi	30*
Detergente Sanizzante	20	1 Dose	/

1) Capovolgere il flacone con il tappo chiuso. Attendere qualche secondo.

2) Ricapovolgere il flacone e poggiarlo su un piano.

3) Una volta tolto il tappo, verrà erogato soltanto il liquido nel dosatore. Versare nell'apposito flacone e diluirlo con acqua, in base alle tabelle di seguito riportate.